

enziSurf[®] INTENSE

multi entsymaattinen
pinnoille
vaikutus

• YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN • CE-MERKITTY LÄÄKINNÄLLINEN LAITE •



enziSurf® INTENSE



Highly effective multi-enzymatic decontaminant concentrate for a deep cleaning of the critical surfaces (floors, operating theatres and tables, emergency services, hospital rooms, etc.) in nursing homes, medical, dental and veterinary practices).


- **KAIKILLE PINNOILLE** - Monikäyttöinen tuote joka puhdistaa minkä tahansa pestävän pinnan jälkiä jättämättä. Ei aiheuta korroosiota. Yhteensopiva kaikkien materiaalien kanssa.
- **NOPEA** - entsyymit rikkovat ja pilkkovat lian varmistaen nopeamman puhdistuksen vähemmällä vaivalla.«SYVÄPUHDISTUS» Entsyymit toimivat tehokkaasti irrottaen näkyvää ja näkymätöntä orgaanista likaa jopa paikoista jotka näyttävät vaikeapääsuisiltä. Ne auttavat myös puhdistamaan pintoja haitallisilta viruksilta ja bakteereilta. enziSurf® vähentää hajuja.
- **EHKÄISEE** - OneLife entsyymien vaikutuksesta lika ei tartu käsitellyille pinnoille niin nopeasti.
- **«LUONNOLLINEN»** enziSurf® INTENSE tarjoaa luonnollisemman vaihtoehdon perinteisille kemikaalivalmisteille, koska se EI SISÄLLÄ fosfaatteja, klooria eikä ammoniakkia.

Käyttöohjeet

Infektion hallinnassa puhdistaminen on ensimmäinen toimenpide

1. Laimenna kuumaan veteen seuraavasti:
2x30ml 5 litraan lämmintä vettä TAI
20ml 10 litraan kuumaa vettä
Suositeltu käyttölämpötila 35-50°C


2. Levitä tuote kontaminoituneelle pinnalle.
3. Hankaa tarvittaessa.
4. Anna kuivua.

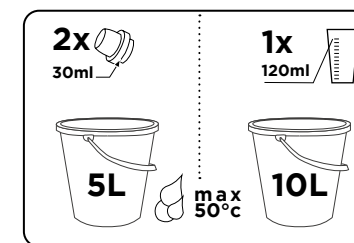

HUOM. muista puhdistaa säännöllisesti pinnat joihin potilaat koskevat. Pintojen pesun lisäksi on suositeltavaa myös desinfioida pinnat täydellisen puhdistuksen suorittamiseksi. On syytä muistaa, että lääkintäviranomaiset suosittelevat välttämään turhan usein toistuvaa desinfiointia jotta vältetään edesauttamasta mikrobilääkeresistenssin kehittymistä.

Käyttökohteet

- Critical surfaces
- Tables
- Operating tables
- Work plan
- Offices
- Counters
- Floors
- Corridors

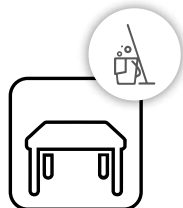

Tuoteominaisuudet

- Highly concentrated formulation combining raw materials of plant origin with enzymes for greater efficiency
- Non-aggressive for the user and the material in contact (compatible with all materials)
- Odourless
- Dye free
- Highly active enzyme complex
- Rate of biodegradability >97% in 28 days (OECD 302B)



Muut ominaisuudet

Olomuoto: kellertävä neste

Varotoimenpiteet

Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa, suljettuna, +4°C - 25°C lämpötilassa.

Parasta ennen: 24 kk valmistuksesta

Main Components

99% raaka-aineista on luonnollista alkuperää.

Monientsymaattinen yhdiste:



proteasi
amylaasi
lipaasi

Delivery Units:



Ref **OL52532**
6 x 1L



Ref **OL52533**
1 x 5L



Maahantuonti & markkinointi:

SYMPPIIS International Oy
PL 67, 02771 Espoo
puh. 020 735 3333
www.symppis.com - info@symppis.com

onelifebiofilmfree.com

SYMPPIS - Terveenä kotiin™

Made in Belgium